



DAS VOLLE PROGRAMM  
FÜR DIE FLÄCHE IN NUR



## Incidin™ Pro

### FLÄCHENDESINFEKTIONSMITTEL FÜR MEDIZINPRODUKTE UND OBERFLÄCHEN ALLER ART

Incidin™ Pro setzt mit seiner SMART-BALANCED-Formel einen neuen Standard für die Profi-Reinigung und Desinfektion von Oberflächen.

- ▲ Ihr Pro für Schnelligkeit
- ▲ Ihr Pro für Effektivität
- ▲ Ihr Pro für Verträglichkeit



**ECOLAB®**

[www.ecolab.com](http://www.ecolab.com)

# Incidin™ Pro

Flächendesinfektionsmittel mit Glucoprotamin™, aldehydfrei und ohne Farb- und Duftstoffe



Das volle Programm in nur 60 Minuten - Getestet nach neuesten EN-Normen:

- ▲ Wirksamkeit gemäß 4-Felder-Test nach 5 Minuten bei 1%
- ▲ Wirksamkeit gegenüber Norovirus nach 60 Minuten bei 1%
- ▲ Tuberkulozide Wirksamkeit nach 60 Minuten bei 1,5%
- ▲ Mykobakterizid Wirksamkeit nach 60 Minuten bei 1,5%

UNSERE LEISTUNG	IHR NUTZEN
Breites Wirkspektrum – nach den neuesten EN Standards getestet	Effektive Desinfektion und Reinigung
Kurze Einwirkzeiten bei niedrigen Anwendungskonzentrationen	Zeit- und Kostenersparnis
Exzellente Reinigungsleistung	Saubere Oberflächen mit hoher Materialkompatibilität

WIRKSAMKEIT	KONZENTRATION		EINWIRKZEIT Min.
	%	ml/L	
<b>VAH-Liste (bakterizid, levurozid)</b>			
Flächendesinfektion gemäß VAH 2015, mit Mechanik, mit geringer und hoher Belastung	0,5/1	5/10	30/15
<b>Prüfung nach DVV / RKI-Leitlinie</b>			
Begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV) gemäß RKI-Empfehlung 1/2004*	0,25/0,5	2,5/5	30/15
Norovirus (MNV)*	1,5	15	30
Rotavirus*	1/1,5	10/15	60/5
Adenovirus*	2	20	60
Papovavirus / Polyomavirus / SV40*	1,5	15	15
<b>EURO-Normen (geringe und hohe Belastung)</b>			
EN 13727 (bakterizid)	0,25	2,5	5
EN 13624 (levurozid)	0,25	2,5	5
EN 14348 (mykobakterizid)	1,5	15	60
EN 14476 (Norovirus, MNV)	1/1,5	10/15	60/30
EN 14476 (begrenzt viruzid PLUS)	2/1**	20/10**	30/60**
<b>EURO-Normen 4-Felder-Test (geringe und hohe Belastung)</b>			
EN 16615 (bakterizid)	0,5/1	5/10	15/5
EN 16615 (levurozid)	0,5/1	5/10	15/5

\* DVV 2015 (Susp. Test) \*\* geringe Belastung

## BESTELLINFORMATIONEN

PRODUKT	VERPACKUNGSEINHEIT	ARTIKELNUMMER
Incidin™ Pro Dosierbeutel	400 x 20 ml	30 765 60 PZN 108 328 71
Incidin™ Pro Dosierflasche	3 x 2 L	30 766 80 PZN 101 793 88
Incidin™ Pro Kanister	6 L	30 767 60 PZN 101 793 71
Incidin™ Pro Kanister	30 L	30 767 80

EUROPEAN HEADQUARTERS:  
ECOLAB EUROPE GMBH

Richtstrasse 7  
8304 Wallisellen  
Switzerland  
+41 (0) 44-877-2001

[www.ecolab.eu](http://www.ecolab.eu)



ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH  
Ecolab-Allee 1  
40789 Monheim am Rhein  
+49 (0) 2173-599-1900

[www.ecolabhealthcare.de](http://www.ecolabhealthcare.de)

## ANWENDUNGSBEREICH



Oberflächendesinfektion für Medizinprodukte



Flüssiges Desinfektionsmittelkonzentrat zur Desinfektion von Flächen aller Art.

ⓓ BIOZID N-54665

## GEBRAUCHSANWEISUNG

Gebrauchslösung durch Verdünnen mit Wasser von Trinkwasserqualität (max. 30 °C) in der gewünschten Konzentration ansetzen.

Zu behandelnde Fläche feucht abwischen. Dabei auf gleichmäßige Benetzung achten.

Bei der Produktanwendung stets geeignete persönliche Schutzausrüstung tragen.

Amin- bzw. aminderivathaltige Desinfektionsmittel und aldehydhaltige Desinfektionsmittel sind nicht im Wechsel anwendbar. Bei Umstellung ist eine gründliche Zwischenreinigung notwendig.

## ZUSAMMENSETZUNG

In 100 g ist als Wirkstoff enthalten:  
10,0 g 2-Phenoxyethanol,  
8,0 g N,N-bis-(3-Aminopropyl)dodecylamin,  
7,5 g Benzalkoniumchlorid

## GUTACHTEN

Umfangreich geprüft - mikrobiologisch, toxikologisch und ökologisch.

Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne unsere aktuellen Gutachten zur Verfügung.

## LAGERUNG

Produkt in der Originalverpackung nicht über 25 °C lagern.

Kühl, trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern.

BIOZIDE UND MEDIZINPRODUKTE  
VORSICHTIG VERWENDEN. VOR  
GEBRAUCH STETS ETIKETT UND  
PRODUKTINFORMATIONEN LESEN.  
NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN  
GEBRAUCH.

CE 0297

**ECOLAB®**

[www.ecolab.com](http://www.ecolab.com)